






HiPPO H1 alkalmazás letöltése és telepítése

Olvasd be a QR-kódot mobiltelefonoddal vagy keresd meg és töltsd le az ingyenes **HiPPO H1** alkalmazást az alkalmazás áruházból és telepítsd!

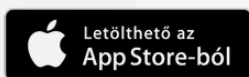

Felhasználói fiók regisztráció

Az alkalmazás megnyitásához kattints az ikonra, ezután regisztrálj egy Felhasználói fiókot, majd jelentkezz be. A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez kövesd az oldalon megjelenő utasításokat.

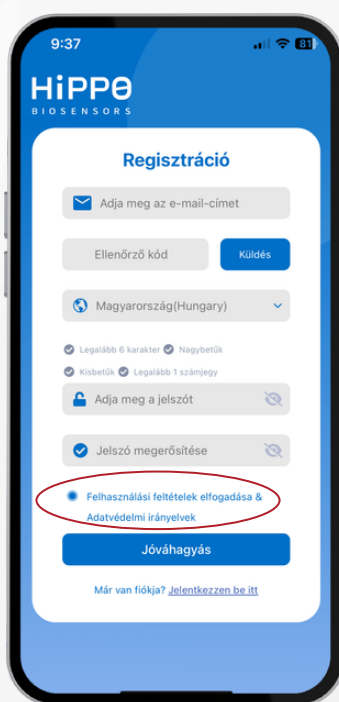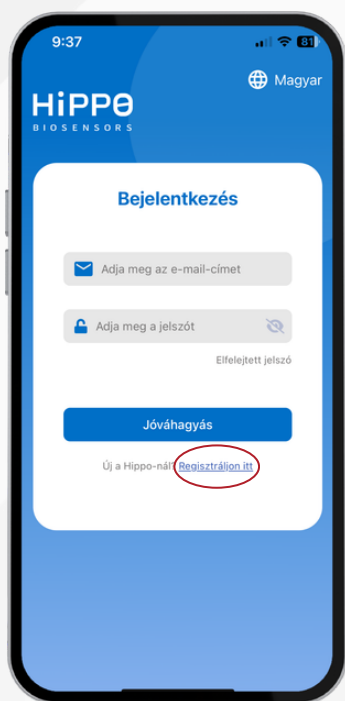

- 1.) E-mail cím megadása
- 2.) Felhasználói feltételek elfogadása & Adatvédelmi irányelvek
- 3.) Küldés gomb megnyomása
- 4.) E-mailben kapott ellenőrzőkód beírása
- 5.) Jelszó megadása
- 6.) Jóváhagyás

Az optimális működés érdekében engedélyezd a Bluetooth-, helymeghatározás- és értesítési hozzáférést, valamint az automatikus frissítést. Kérjük, kapcsold ki az alacsony töltöttségű módot is, hogy az alkalmazás folyamatosan működhessen és a szenzorral való kapcsolat ne szakadjon meg.

Csatlakozás új szenzorhoz




Az alkalmazás megnyitása után a főképernyőn koppints a „**Csatlakozás új szenzorhoz**” gombra. Kövesd a megjelenő útmutatót, amely végigvezet lépésről lépésre a szenzor helyes felhelyezésén.




Telefonod kamerájának segítségével olvasd be az applikátorra nyomtatott QR-kódot **vagy** add meg manuálisan a szenzor dobozán is megtalálható SN számot a párosításához.

Eszköz inicializálása

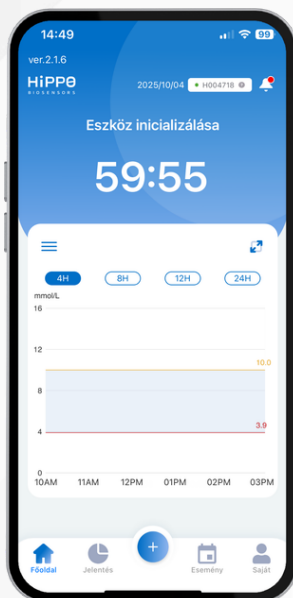

Ha a párosítás sikeres volt, megjelenik az „**Eszköz inicializálása**” képernyő, rajta a szenzor inicializálási állapotából hátralévő idővel.

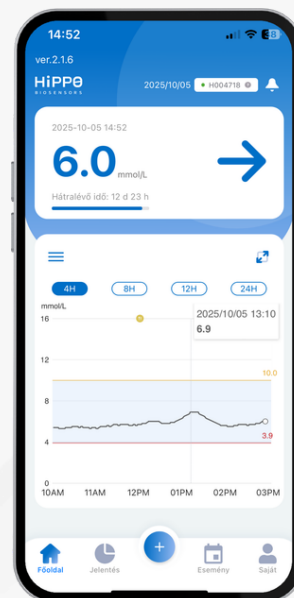

60 perc elteltével a szenzor inicializálási állapota befejeződik. Ettől a ponttól kezdve a szenzor által mért glükózértékek elérhetővé válnak és ha a Bluetooth-kapcsolat megfelelő, az értékek 3 percnként frissülnek.

