





H-Link H1 alkalmazás letöltése és telepítése

Olvasd be a QR-kódot mobiltelefonoddal vagy keresd meg és töltsd le az ingyenes **H-Link H1** alkalmazást az alkalmazás áruházból és telepítsd.

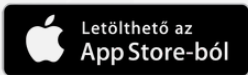

Követői fiók regisztráció

Regisztrálj egy követői fiókot, majd jelentkezz be. Sikeres bejelentkezés után a 3. képen látható főképernyő fog megjelenni. A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez kövesd az oldalon megjelenő utasításokat a HiPPo H1 felhasználói fiók regisztrációjához hasonlóan.

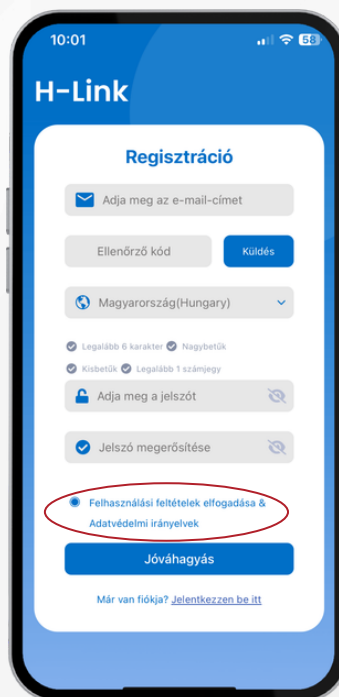


Az optimális működés érdekében engedélyezd a Bluetooth-, helymeghatározás- és értesítési hozzáférést, valamint az automatikus frissítést. Kérjük, kapcsold ki az alacsony töltöttségű módot is, hogy az alkalmazás folyamatosan működhessen.

Követési kérés küldése



VAGY

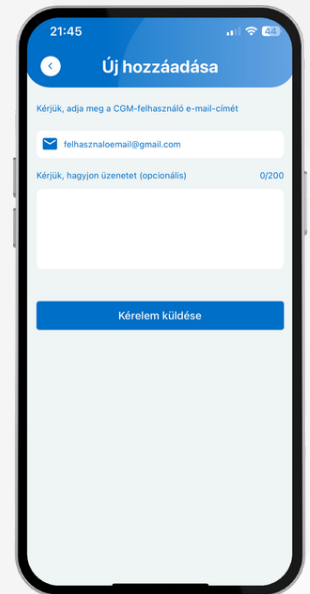



A főképernyőn koppints a „+” ikonra, majd a **CGM felhasználó fiókjához tartozó QR-kód** beolvasásával küldj követési kérelmet. **Fontos:** ne a szenzor QR-kódját olvasd be.

A felhasználói fiókhoz tartozó QR-kódot a CGM felhasználók a **HiPPO H1 alkalmazásukban** a „Saját menü” képernyő jobb felső sarkában található QR-kód ikonra koppintva jeleníthetik meg.

Alternatív megoldásként a követni kívánt HiPPO H1 **CGM felhasználó e-mail címének** megadásával is elküldheted a követési kérelmet.

Követési kérés elfogadása

A CGM felhasználónak engedélyeznie kell a követési kéréseket a saját HiPPO H1 alkalmazásában, a „Főoldalon” a jobb felső sarokban található **csengő ikonra** kattintva az üzenetközpontban.

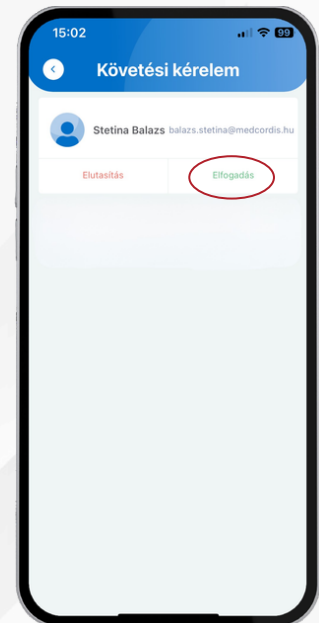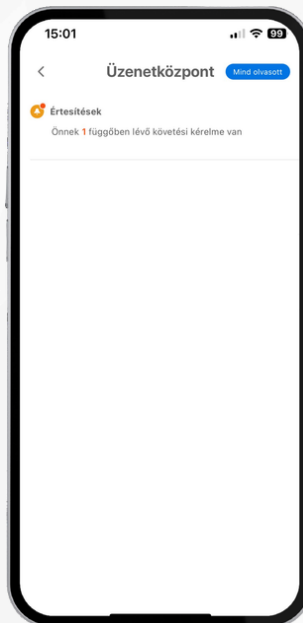

A jóváhagyást követően valós időben láthatod a CGM felhasználó glükózádatait, valamint hang- és felugró értesítéseket is kaphatsz a riasztásokról. **A funkció használatához mindkét eszközön aktív internetkapcsolat szükséges.**

